

## 1. Ist Ihr Testpaket vollständig?

**Bitte überprüfen Sie zunächst, ob Ihr Testpaket vollständig ist. Es sollte enthalten:**

- In Plastikverpackung:
  - 1 sterilisierter Abstrichtupfer
  - 1 Transportröhrchen mit Transportmedium (Plastikröhrchen mit Etikett „Name“ („Name“) und „Probendatum“ („Date“))
- 1 Versandtasche

Fehlendes Zubehör können Sie nachfordern:  
Tel. +49 6131 7205-0 (Mo. - Fr. von 8 -19 Uhr)

## 2. Testvorbereitung

1. Bitte hantieren Sie mit dem Watteträger nicht außerhalb des Probenentnahmeortes oder außerhalb des Transportmediums.
2. Bitte achten Sie darauf, dass die Probe bei der Abnahme nicht verunreinigt wird.
3. Bis zum Versand ist die Probe bei Raumtemperatur zu lagern.

## 3. Testdurchführung


1. Nehmen Sie den Abstrichtupfer aus der Plastikverpackung.

### Hautabstrich/Wundabstrich:

2. Aus dem betroffenen Hautareal nehmen Sie mit dem Wattetupfer Probenmaterial, ggf. sollten Sie diesen unter drehenden Bewegungen fest reiben.

### Nasenabstrich:

2. Führen Sie den Wattetupfer in die Nasenöffnung (waagrecht/parallel zum Rachendach) ca. 2-3 cm unter drehenden Bewegungen in den nasalen Rachenraum.
3. Reiben Sie mit dem Wattetupfer mehrere Male sanft an der Schleimhaut.

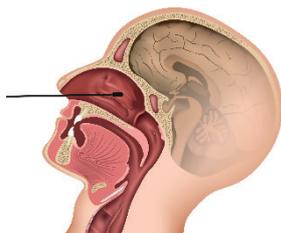

### Rachenabstrich:

2. Drücken Sie mit einem Spatel oder Löffel die Zunge herunter.
3. Von den Tonsillen und der hinteren Rachenwand entnehmen Sie mit dem Wattetupfer unter drehenden Bewegungen Probenmaterial.
4. Bitte achten Sie darauf, dass Sie mit dem Wattetupfer keinen Speichel aufnehmen bzw. nicht die Wangenschleimhäute berühren.

→ Fortsetzung auf nächster Seite

#### Wangenabstrich:

2. Drücken Sie mit einem Spatel oder Löffel die Zunge herunter.
3. Von der Wangeninnenwand entnehmen Sie mit dem Wattetupfer Probenmaterial.
4. Bitte achten Sie darauf, dass Sie mit dem Wattetupfer keinen Speichel aufnehmen.

#### Zungenabstrich:

2. Streichen Sie mit einem Spatel die Zunge mit ausreichendem Druck nach vorne aus.
3. Nehmen Sie mit dem Wattetupfer den ausgepressten Belag von der Zunge oder vom Spatel auf.
4. Bitte achten Sie darauf, dass Sie mit dem Wattetupfer keinen Speichel aufnehmen.

## 4. Probenversand

1. Nach der Probenentnahme drehen Sie den farblosen Deckel des Plastikröhrchens mit dem Transportmedium ab und stecken Sie den Wattetupfer hinein.
2. Den farblosen Deckel des Transportröhrchens können Sie im Hausmüll entsorgen.
3. Füllen Sie auf dem Transportröhrchen das Etikett mit Namen des Patienten („Name“) und Probendatum („Date“) aus. Vermerken Sie unter „Specimen“ den konkreten Ort der Probenahme (Haut, Nase, Rachen oder Ort der Wundstelle).
4. Zum Versand legen Sie das Versandgefäß mit der Probe und dem unterschriebenen sowie mit Abnahmedatum und -zeit ausgefüllten Probenbegleitschein in die Versandtasche. Verschließen Sie diese sorgfältig, indem Sie die Schutzfolie auf der Innenseite des Klebestreifens entfernen und die Verschlussstellen fest aufeinander drücken.

#### Achtung:

Der Umschlag lässt sich anschließend nicht mehr öffnen.

Der Versand in **Deutschland** sollte von **Montag bis Donnerstag**, nicht zum Wochenende oder vor Feiertagen erfolgen.

Aus **Österreich** und der **Schweiz** sollte der Versand von **Montag bis Mittwoch**, nicht vor Feiertagen erfolgen.

Kunden aus der Schweiz sollten beachten, dass die Versandtasche in einer Poststation am Schalter noch am gleichen Tag der Probenahme abzugeben ist.